

94% koki virtsankarkailun vähenevän

Käyttäjättestissä, jossa oli mukana 34 naista, jotka kokivat virtsankarkailuongelmia juoksuharjoittelun aikana, testasivat Efemia rakkotukea. 94% ilmoitti, että tuote oli vähentänyt virtsankarkailua juoksun aikana.

REF: CI8007-02

Testaa kotona !

Olemme kaikki erilaisia, joten aloita Starter Setillä, jotta löydät itsellesi sopivan koon. Setissä on kaikki kolme kokoa ja sitä voidaan käyttää uudelleen kolmen kuukauden ajan.



Tietoa

Efemia rakkotuki on kehitetty ja valmistettu Ruotsissa, valmistaja Invent Medic Sweden. Yritys kehittää innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, tavoitteena parantaa naisten terveyttä ja elämänlaatua.

Tuote on CE-merkitty luokan IIb (0123) lääkinällinen laite.



Markkinointi:
OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
www.onemed.fi
puh. 0207866810

Kysymyksiä?

Jos sinulla on kysymyksiä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@onemed.com



efemia

bladder support




Vähentää virtsankarkailua ponnistusinkontinenssissa

TVS1000


Turvallinen ja tehokas

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssi on virtsankarkailua, joka aiheutuu fyysisestä ponnistuksesta, esim. urheillessa, yskiessä, niistäessä tai nauraessa. Se on kaikkein yleisin naisten inkontinenssin muoto ja vaikuttaa elämään monin tavoin.

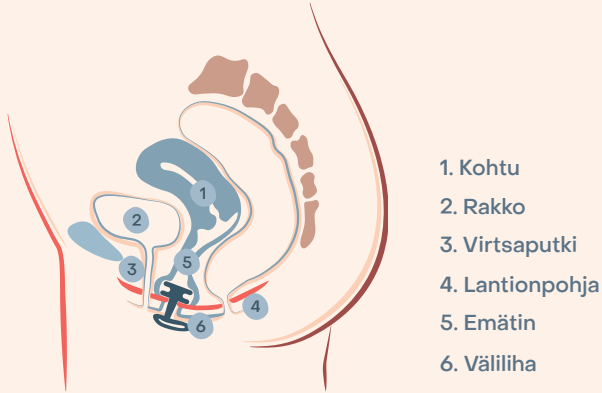


Fysiologia

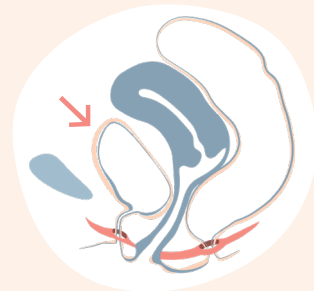


Kun rakkoon kohdistetaan painetta, virtsaputki sulkeutuu lantionpohjan lihasten avulla ja virtsankarkailu estyy.

Jos ligamentit ovat vahingoittuneet tai lantionpohjanlihakset ovat heikentyneet, sama paine voi sen sijaan työntää järjestelmää auki aiheuttaen virtsankarkailua. Tämä on ponnistusinkontinenssia.

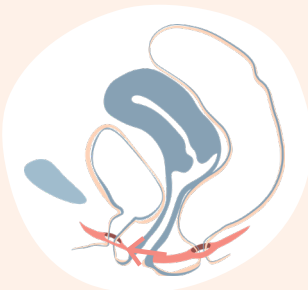

Efemia Bladder Support

Vaginaalinen, ei-kirurginen apuväline, joka on kehitetty samoista tieteellisistä periaatteista kuin yleisimmät kirurgiset toimenpiteet ponnistusinkontinenssissa.

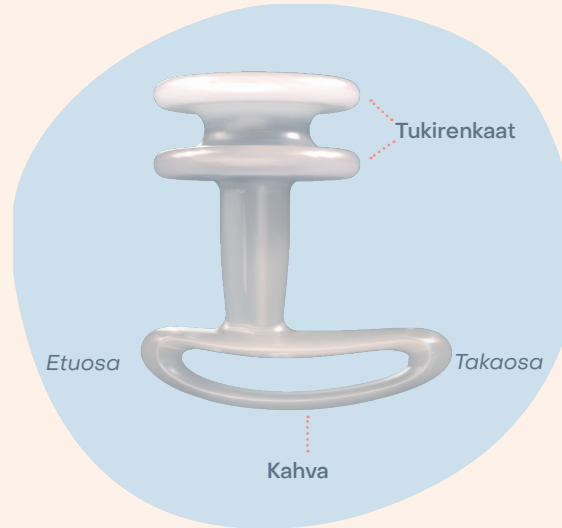

Hyödyt

- Uudelleenkäytettävä 3 kuukauden ajan
- Pehmeä ja miellyttävä materiaali
- Pieni ja mukava
- Voidaan käyttää harjoituksen aikana
- Istuu hyvin emättimeen
- Helppo puhdistaa saippualla ja vedellä

Yksityiskohdat

Voidaan käyttää jopa 16 tuntia 24:n tunnin aikana

Koot: 30mm, 35mm ja 40mm
(Starter Set sisältää kaikki kolme kokoa)

Materiaali: Lääketieteellisen tason silikonilla

30 mm



35 mm




40 mm




Kuinka laite toimii

Efemia asetetaan emättimeen niin että kahva on häpyluuta/perineumia vasten.

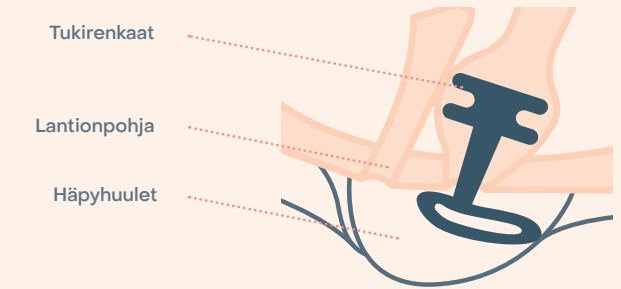

Varmista, että tukirenkaat ovat kokonaan emättimen aukon sisäpuolella ja lantionpohjan yläpuolella, aivan kuten tamponi.

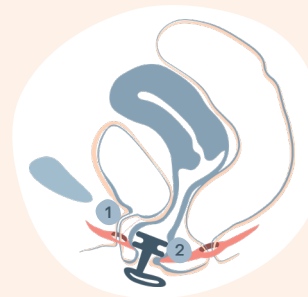

Kun rakkoon kohdistuu painetta, virtsaputken keski-osa työntää hieman Efemian tukirenkaita ja se taipuu, jolloin vuoto vähenee tai estyy. Laitetta ei tarvitse poistaa wc-käynnin yhteydessä.

1. Virtsaputki 2. Tukirenkaat

Älä käytä Efemiaa

Jos olet raskaana tai alle 18-vuotias.

Varoitukset

Käytä vesipohjaista liukuvoidetta, jos sinulla on kuivat limakalvot tai herkkä intiimialue.

Vähennä laitteen käyttöä, jos sinulla ilmenee laitteeseen liittyviä fyysisiä oireita, jotka eivät häviä. Hakeudu lääkärin vastaanotolle, jos oireet eivät häviä, vaikka olet vähentänyt laitteen käyttöä.