



ANGELSOUNDS KOTIDOPPLER 100B

1. Liitä adapteri laitteen yläpuolella olevaan reikään (+/- merkintä), ladattavat paristot alkavat latautumaan. Merkkivalo syttyy palaa latauksen merkiksi. Ensimmäinen lataus olisi hyvä olla 12-16 tuntia jotta ladattavat paristot latautuvat kunnolla.
2. Kun paristot ovat täynnä aloita kuunteleminen painamalla On/Off – kytkintä. Laitteen LCD näyttö valaistuu siniseksi. Täten laite on heti kuunteluvalmis. Säädä äänen voimakkuutta nuolinapeista laitteen etuosassa.
3. Levitä kapeaan kahvaosan lähettimeen (kahvan alapuoli) ultraäänigeeliä. Tämän jälkeen aseta laitteen alapuolella oleva lähetin alamaahan ja siirtele lähetintä pikkuhiljaa mahalla ympäriinsä. Erotat vauvan sydämen sykkeen omastasi sen nopeammasta temmosta. Kyseinen ääni kuulostaa "laukkaavilta hevosilta".
4. Kun löydät vauvasi sydämensykkeet niin näet hetken kuluttua LCD näytöltä vauvasi sydämensykkeet (per minuutti).

Näyttösymbolit (käyttöohje s.9):

Battery Indicator: Kun patterin kuva ilmestyy näyttöön vasemmalle ylös, on paristot lopussa. Patterin kuva ja tietokoneen kuva vilkkuvat näytössä.

Warning: Kun kellon kuva ilmestyy näytön vasemmalle puolelle, tarkoittaa tämä että koneen saamat sykesignaalit ovat heikot, johtuen liian varhaisista viikoista, siitä että vauva liikkuu kuuntelu hetkellä tms.

Tämä merkki varoittaa että saamasi sykkeet eivät välttämättä pidä täten paikkansa. Ota sykkeet uudelleen hetken päästä tai kun viikkoja on enemmän.

FHR Display: Näyttö ilmoittaa sikiön sykkeet/per minuutti