

RASKAUSTESTI (liuska)

OneStep raskaustesti on nopea ja helppokäyttöinen virtsasta tehtävä testi. Raskaustesti mittaa HCG (istukkahormoni) pitoisuuden virtsasta. HCG hormonia alkaa erittyä raskauden alussa istukasta. Tätä hormonia esiintyy elimistössä siis vain raskauden aikana. HCG hormonin määrä kasvaa virtsassa päivä päivältä, jonka vuoksi raskaustestin testiviivan vahvuus vaihtelee.

Raskaustestin käyttäjän on hyvä huomioida, että Pregnyl lääke sisältää istukkahormonia ja täten raskaustesti voi liian aikaisin lääkkeen oton jälkeen näyttää harhaanjohtavan positiivisen tuloksen. Terolut ja Clomifen lääkitys ei vaikuta raskaustestin tulokseen.

MILLOIN VIRTSA-NÄYTE TULEE OTTAA?

Testin voi tehdä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Paras testin teko aika on kuitenkin aamuvirtsa, jolloin HCG-arvo on korkeimmillaan.

MITEN TESTI TEHDÄÄN ?

1. Testitikun ja virtsan tulee olla suurin piirtein huoneenlämpöisiä (18°C - 30°C).
2. Avaa ilmatiivis pakkaus ja ota testi esiin
3. Upota testiliuska virtsaan MAX-merkkiin saakka nuoli alaspäin osoittaen. Ota testi pois virtsasta 10 sekunnin päästä ja aseta tasaiselle, puhtaalle, kuivalle ja imukyvyttömälle pinnalle (esimerkiksi pakkauspaperin päälle).

Älä anna testin kastua MAX-merkkirajan yli sillä testi ei silloin toimi oikein.


4. Odota värillisten viivojen ilmaantumista testitikkuihin. Positiivinen tulos voi olla näkyvässä testissä jo minuutin kuluttua. Negatiivisen tuloksen varmistumista tulee odottaa testin koko 8 minuuttinen reaktioaika. Testitulokset ei ole enää luotettava kun aikaa on kulunut enemmän kuin 10 minuuttia.

MITEN TULOS LUETAAN ?

Negatiivinen tulos (et ole raskaana): Ainoastaan yksi värillinen viiva tulee näkyviin kontrollialueelle. Testialueelle ei tule viivaa. Tämä tarkoittaa että et ole raskaana.

Positiivinen tulos (olet raskaana): Selkeä värillinen viiva ilmestyy sekä kontrolli- että testialueelle. Tämä tarkoittaa että olet raskaana. Viivojen värin voimakkuus voi vaihdella sillä eri vaiheessa raskautta HCG-pitoisuus virtsassa on eri.

Epäonnistunut: Ei näkyvää viivaa tai viiva on ainoastaan testialueella eikä ollenkaan kontrollialueella. Testaa uudestaan uudella testillä.

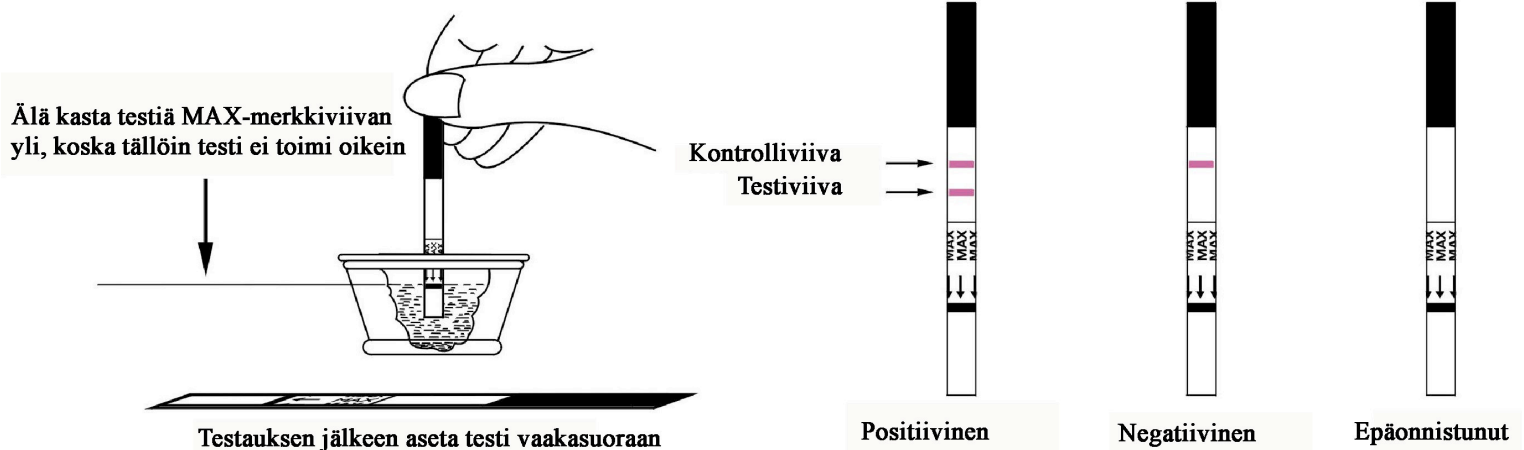

SÄILYTYS JA KESTO

Testi tulee säilyttää 4°C - 30°C avaamattomassa pakkauksessa. Testipakkauksien tulee välttää suoraa auringonpaistetta ja kosteutta. Testipakkauksissa lukee parasta ennen päiväys.